

## FICHE TECHNIQUE

# Masque Limber BREATH FFP2 NR

Modèle PPE/A




· FFP2 PPE/A  
Blanc



· FFP2 PPE/A  
Noir

### Composition

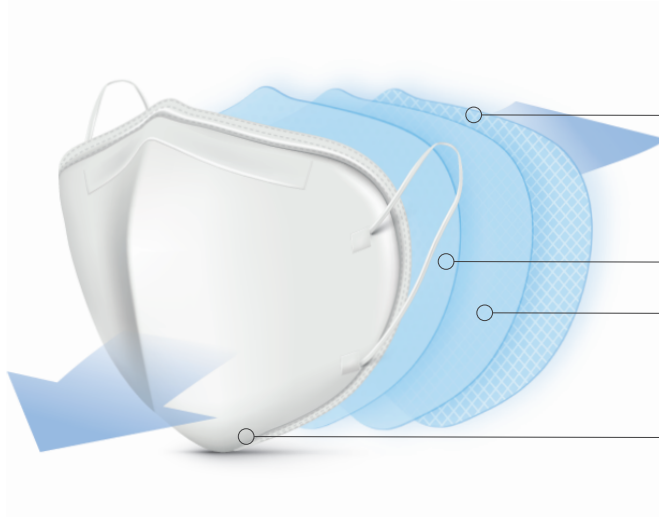

40gr/m<sup>2</sup>  
Spunbond  
**SUPER DOUX**

2 x 25gr/m<sup>2</sup>  
Meltblown haute qualité  
**HAUTE FILTRATION, RESPIRABILITÉ  
MAXIMALE**

40gr/m<sup>2</sup>  
Spunbond hydrophobe  
**STRUCTUREL**



Respirabilité maximale sur 4 couches haute qualité

## Certification

CE-Certified  
 EN 149:2001 +A1:2009  
 Notified Body 0370  
 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER  
 S.A. (APPLUS). Campus UAB,  
 Apto Correos 18 08193 Bellaterra,  
 Barcelona, España



## Fabricant


TST NO TEJIDO SL  
 Pol. Ind. IP7 - Av. Francia, 5.  
 46890 Agullent, Valencia (Spain)  
 www.tejidosintejer-notejido.es  
 +34 961 116 256  
 www.limberprotection.com





Déclaration de Conformité



## Tableau comparatif de Respirabilité

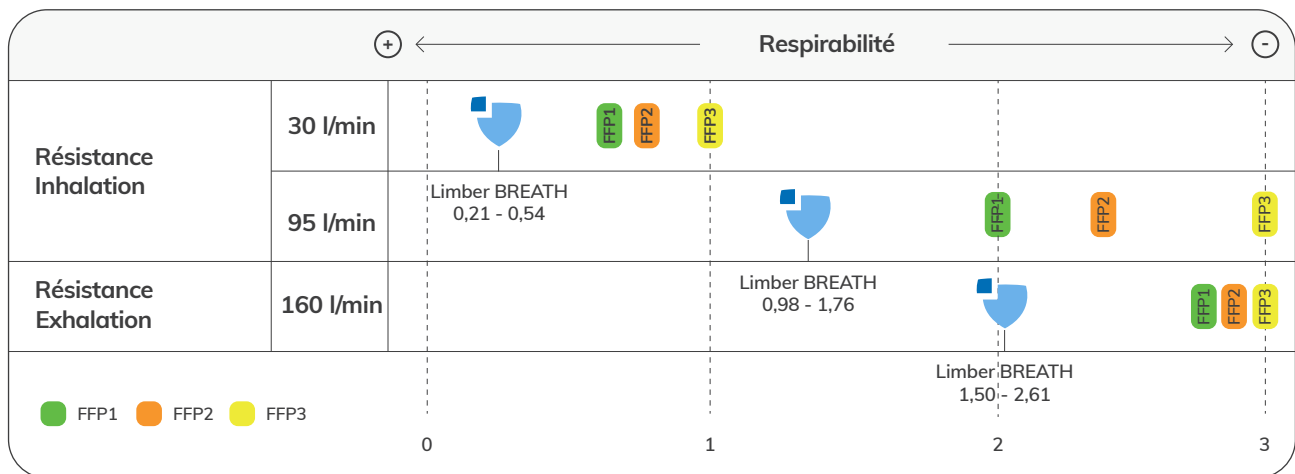

## Tableau comparatif de filtration

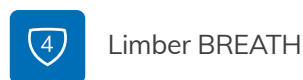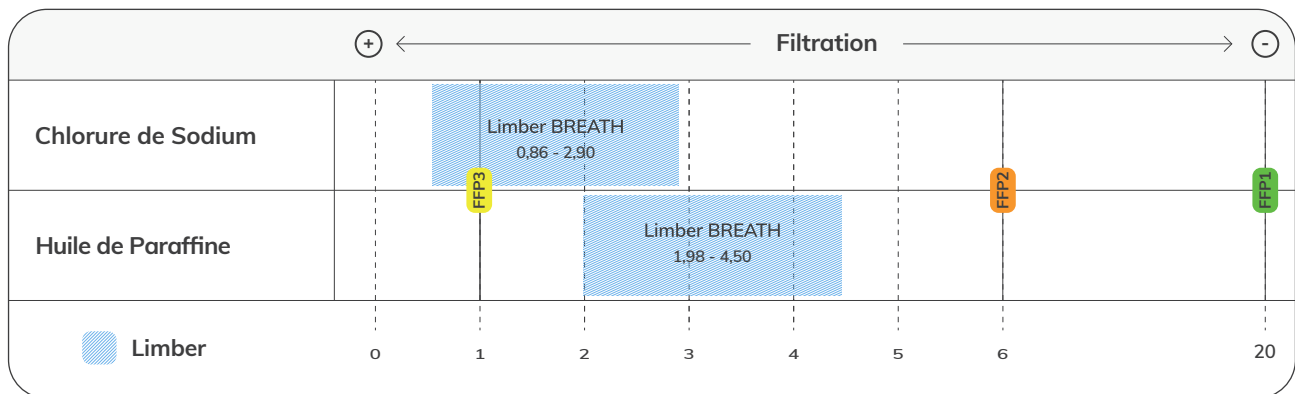

# Logistique et emballage

	Unités	Packs	Présentoirs	Boîtes	Mesures	Poids
Flow Pack	1				19 x 11,4 cm	
Présentoir	25	25	1		19,6 x 11,6 x 15,6 cm	0,5 KGS
Boîte	1.250	1.250	50	1	60 x 80 x 40 cm	13 KGS
Palette	12.500	12.500	500	10	80 x 120 x 220 cm	137 KGS

## Flow Pack

Contient 1 unité de masque et étiquetage complet




## Présentoir

Contient 25 unités de masques et étiquetage complet

## Instructions pour l'utilisation et la conservation



Produit à usage unique.

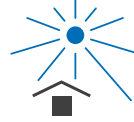

Maintenir éloigné de la lumière solaire directe.



Humidité relative maximale  
<80%



Intervalle température de stockage  
-20° / +25°



Ne pas utiliser le masque pendant plus d'une période de travail ou bien 12 heures.

## Instructions d'ajustement

1




Bien se laver les mains au savon et à l'eau ou avec une solution hydro alcoolique.

4



Placer le masque de manière à éviter les bâillements entre le contour de celui-ci et le visage.

2

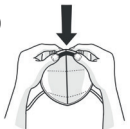

Localiser la barrette nasale et la modeler à l'aide des doigts en forme courbée pour éviter la forme pointue.

5



Ajuster la barrette nasale afin d'obtenir une fermeture hermétique tout autour du nez.

3



Placer le masque sur le visage en cachant le nez, la bouche et le menton, en ajustant les élastiques par derrière les oreilles.

6



Ne pas toucher le masque une fois l'ajustement réussi. Se relaver les mains au besoin d'un nouvel ajustement.

